

MASCARILLAS HIGIÉNICAS

2 CAPAS - 70 LAVADOS



**DISEÑOS
PERSONALIZABLES
A TODO COLOR**



**Elije tu talla;
S - M - L - XL**

100 UNIDADES
2,40€/u.

300 UNIDADES
2,24€/u.

500 UNIDADES
2,08€/u.

1.000 UNIDADES
1,92€/u.



**TRANSPORTE INCLUIDO
I.V.A. NO INCLUIDO**

i medisa
artes gráficas

Papel & Toner



Reutilizables

Recomendaciones de uso / Recommendations for use

- 1 Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla. / Wash your hands with soap and water or rub them with a hydroalcoholic solution before handling the mask.
- 2 Identificar la parte superior de la mascarilla. / Identify the top of the mask.
- 3 Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz. / Position the mask on the face, at the level of the nose.
- 4 Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar la goma a ambos lados de las orejas. / Hold the mask from the outside and attach the rubber to both sides of the ears.
- 5 Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla. / Lower the bottom of the mask to the chin.
- 6 Verificar que la mascarilla cubre la barbilla. / Verify that the mask covers the chin.
- 7 Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia de molestias respiratorias. / Verify that the mask is correctly positioned. You need to verify the sealing and the absence of respiratory discomfort.
- 8 Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica. / Once adjusted, do not touch the mask with your hands. If he user needs to touch the mask, must previously wash hands with soap and water or rubbing them with a solution hydroalcoholic.
- 9 La mascarilla no puede quedar colgada del cuello del usuario. / The mask cannot hang around the user's neck.
- 10 Cambie la mascarilla si está húmeda. / Change the mask if it is wet.
- 11 Desinfecte de nuevo las manos después de retirar la mascarilla. / Disinfect your hands again after removing the mask.
- 12 La mascarilla reutilizable debe lavarse a 60°C cuando haya sido utilizada. / The reusable mask should be washed at 60°C after usage.



MADE IN SPAIN



ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento de UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016/425"

WARNING: This device is not a health product within the standard 93/42 or the EU regulation 2017/745, nor an individual protective equipment within the EU regulation 2016/425.

EL TEJIDO CUMPLE LAS NORMAS
FABRIC APPROVED ACCORDING
UNE - 0065:2020 - CWA17553/2020

OBLIGATORIO LAVAR ANTES DE USAR
WASH BEFORE USE, MANDATORY

- Transpirable / *Breathable fabric*
- Hidrófugo, resistente a la penetración de líquidos y bacterias
Antibacterial & antiviral waterproof properties

Mascarillas higiénicas (producto no sanitario)
Hygienic masks (non-sanitary product)



100% PES



N.º 20-004593



SOP342 - Bacterial Filtration Efficiency (BFE)

ID	ID AMSLab	Description	Conclusión
7	S-200824-00001	FABRIC MULTICOLORED	Pass

SOP305 - Change of appearance after washing (Garments and fabrics)

ID	ID AMSLab	Description	Conclusión
5	S-200813-00140	FABRIC MULTICOLORED WASHING CYCLES AT 60°C	Pass

SOP342 - Bacterial Filtration Efficiency (BFE) - After Washing

ID	ID AMSLab	Description	Conclusión
8	S-200824-00001	FABRIC MULTICOLORED CYCLES AT 60°C	Pass

SOP106 - Determination of breathability (Diferential Pressure) - After Washing

ID	ID AMSLab	Description	Conclusión
3	S-200813-00138	FABRIC MULTICOLORED CYCLES AT 60°C	Pass



N.º C12230

PRUEBAS REALIZADAS SEGÚN NORMA
TESTS PERFORMED ACCORDING TO
UNE - 0065:2020 - C WA17553/2020

Eficacia de filtración de aerosoles / Aerosol Filtration Efficiency	> 97%
Eficacia de filtración de partículas / Particle Filtration Efficiency	> 95%
Respirabilidad: Presión Diferencial / Breathability: Differential Pressure (Pa/cm2)	< 38%

Después de 70 lavados el tejido mantiene las propiedades de filtración bacteriana y respirabilidad tal como indica la norma UNE-EN 0065.

After 70 washes the fabric maintains the bacterial filtration and breathability properties as indicated by the UNE-EN 0065.